

Handleiding voor het gebruik van Afasietherapie van Logoclicks

Afasietherapie van Logoclicks helpt je om op eenvoudige wijze een grote variatie aan stoornisgerichte maatwerk oefeningen op woordniveau samen te stellen die optimaal aansluiten op de aard en de ernst van de afasie en de interesse en achtergrond van de persoon met afasie.

De cliënt kan de oefeningen thuis of in de praktijk maken op een Android tablet of Apple iPad.

Eerst maak je je eigen account aan en vervolgens maak je je cliënten aan.

Vervolgens genereer en controleer je maatwerk oefeningen voor je cliënt in 5 eenvoudige stappen:

1. Bepaal het soort oefening
2. Kies de gewenste instellingen
3. Controleer de oefeningen
4. Verzend naar de cliënt
5. Bekijk de resultaten

De eerste keer inloggen


Je ontvangt een e-mail van Logoclicks.eu met het onderwerp: 'Welkom bij Afasietherapie' op het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld.

Klik in de mail op: 'Wachtwoord instellen' om je eigen wachtwoord in te stellen.

Onthoud je wachtwoord goed of schrijf het ergens op. Je kan in de meeste browsers ook je wachtwoord automatisch bewaren.

Ga naar <https://logopedist.afasietherapie.nl/> om in te loggen.

Gebruik je Gebruikersnaam en je zelf gekozen Wachtwoord om in te loggen.

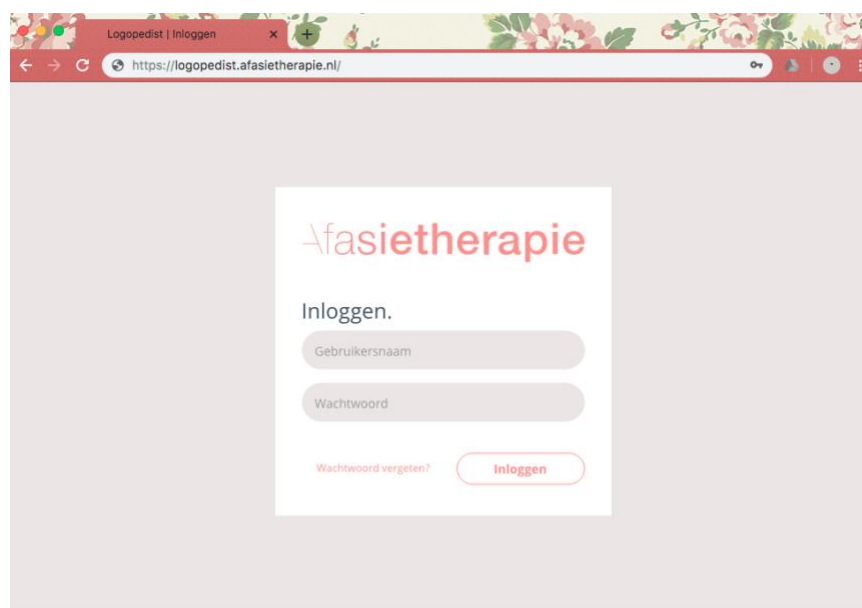

Cliënten aanmaken

Eenmaal ingelogd, kom je op het begin scherm waar de instructies nog eens staan.

Maak je eerst je cliënten aan.

Klik daarvoor op 'Beheer cliënten' en vervolgens op 'Voeg nieuwe cliënt toe'.

Je ziet dan het volgende scherm:

Vul hier de cliënt gegevens in. Het zijn allemaal verplichte velden.

- *Cliënt nummer of identificatie*: Dit is een nummer of identificatie die uw cliënt wilt geven.
- *De heer / mevrouw*: Kies hier het geslacht van uw cliënt.
- *Voornaam cliënt*: Vul hier de voornaam of voorletter van uw cliënt in.
- *Familienaam cliënt*: Vul hier de familienaam van uw cliënt in.
- *E-mail cliënt*: Vul hier het e-mailadres van uw cliënt in.
LET OP: gebruik bij voorkeur het email adres dat ook op het tablet gebruikt wordt. Vraag uw cliënt of er een e-mailadres is voor de Google Playstore of Apple Appstore.
- *Geslacht gesproken tekst*: Kies hier Man of Vrouw. Je cliënt krijgt dan de oefeningen uitgesproken door een mannelijke of vrouwelijke stem.
- *Taal gesproken tekst*: Kies hier Vlaams of Nederlands. Je cliënt krijgt dan de oefeningen uitgesproken in het Vlaams of in het Nederlands.

Maak nieuwe oefeningen

Beheer cliënten

— Overzicht

— **Voeg nieuwe client toe**

Over Afasietherapie van Logoclicks

Mijn gegevens

Voeg nieuwe cliënt toe.

Vul de cliënt gegevens in.

Vul hier de cliënt gegevens in:

Cliënt nummer of identificatie

De heer / mevrouw

Voornaam cliënt

Familienaam cliënt

E-mail cliënt

Geslacht gesproken tekst

Taal gesproken tekst

Maak hier de inloggegevens voor de app van de cliënt aan:

Gebruikersnaam cliënt

Toegangscode van 5 cijfers

Maak hier de inloggegevens voor de app van de cliënt aan. Het zijn allemaal verplichte velden.

- *Gebruikersnaam cliënt:* Kies hier een gemakkelijk te onthouden gebruikersnaam voor je cliënt. Bijvoorbeeld 'voornaamfamilienaam' of 'voorletterfamilienaam'. Vermijd bijzondere tekens en spaties.
- *Toegangscode cliënt:* Kies hier een 5-cijferige code voor je cliënt om in te loggen in de app.

LET OP: De gebruikersnaam en wachtwoord worden NIET naar de je cliënt doorgestuurd. Geef deze gegevens zelf aan je cliënt door en neem samen met je cliënt de instructies voor het gebruik van de app door.

Je kan daarvoor het formulier en de instructies gebruiken dat je vindt onder 'Instructies voor de cliënt':

<https://www.afasietherapie.nl/instructies-voor-het-gebruik-van-afasietherapie/>




Het aanmaken van oefeningen

Klik in het linkermenu 'Maak nieuwe oefeningen' en kies de cliënt waarvoor je oefeningen wilt gaan maken.

1. Bepaal het soort oefening

Kies de oefening die je wilt maken uit het overzicht en ingedeeld in oefeningen voor mondeling en schriftelijk taalproductie en taalbegrip.

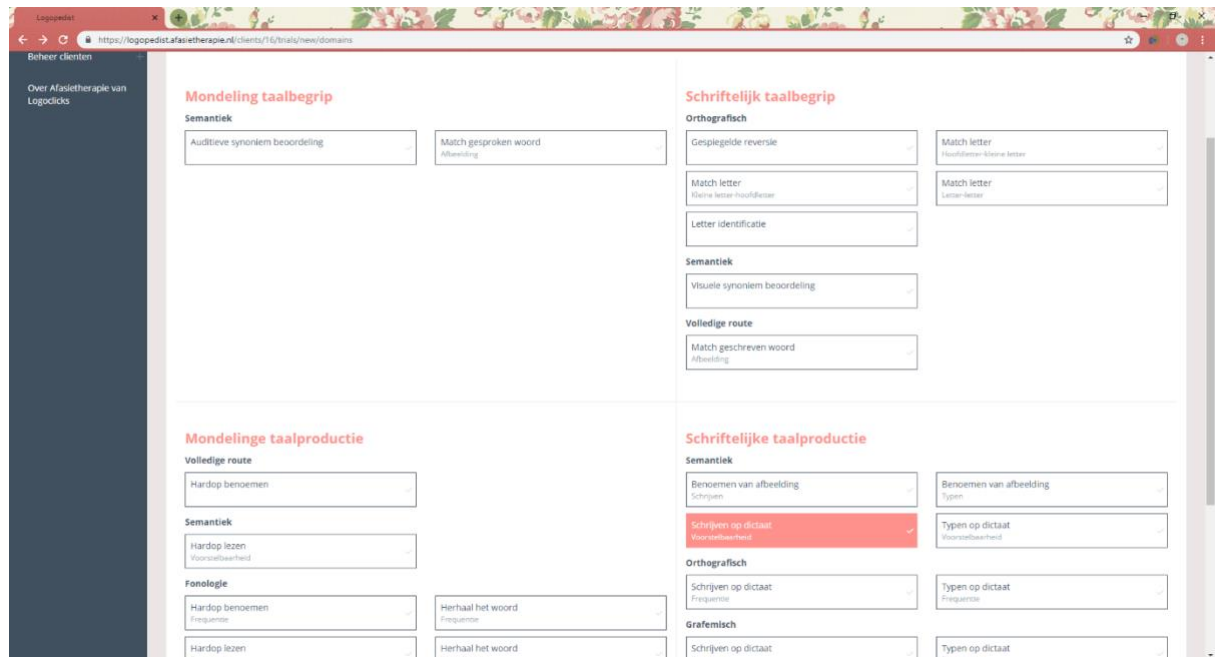

2. Kies de gewenste instellingen

Aantal taken

Kies het aantal taken in een oefening. Je hebt de keuze uit 10, 20 of 30 taken.

Cues

Bij elke oefening staan de cues die voor de gekozen oefening beschikbaar zijn. Dat kan per oefening verschillend zijn. Je kan de cues aan of uit zetten.

De cues, die je gekozen hebt, worden zichtbaar op het tablet van de cliënt.

Aantal antwoorden

Kies hier het aantal mogelijke antwoorden waaruit de cliënt kan kiezen. In feite zijn het de afleiders die de cliënt te zien krijgt.

Moeilijkheid

Bij elke oefening staan de linguïstische variabelen die de moeilijkheid van de oefening bepalen. Dat kan per oefening verschillend zijn. Kies de gewenste moeilijkheid door de deze aan te klikken.

The screenshot shows a web browser window with the URL https://logopedist.afasietherapie.nl/clients/16/trials/new/difficulty/config/trial_type=Elvier-Afasietherapy.Trials.Type.LanguageProduction.Written.Semantics.DictatedWriting.Concreteness. The interface is titled 'Schriftelijke taalproductie - Semantiek - Schrijven op dictaat - Voorstelbaarheid' and includes a progress bar with four steps: 1. Kies oefening, 2. Moeilijkheid en cues, 3. Controle oefeningen, and 4. Verzending naar client. The main content area is titled 'Schriftelijke taalproductie - Semantiek - Schrijven op dictaat - Voorstelbaarheid' and contains the following settings:

- Aantal taken: 10 (selected), 20, 30
- Beschikbare cues:
 - Toon geschreven woord: aan (selected), uit
 - Eerste letter: aan (selected), uit
 - Vraag uitspreken: aan (selected), uit
 - Toon synoniem: aan (selected), uit
- Voorstelbaarheid: hoog, gemiddeld (selected), laag

At the bottom, there are 'Terug' and 'Genereer' buttons.

Als je tevreden bent over de instellingen, klik rechts beneden op 'Genereer'.
De software stelt dan uit de ingestelde variabelen de oefeningen samen.

3. Controleer de oefeningen

Na het genereren van de oefeningen zie je het overzicht van de woorden in de taken.
Als je niet tevreden bent met de woorden, kies dan 'Opnieuw genereren'.
Als je wel tevreden bent klik dan rechts beneden op 'Afronding oefening'.

Foutmeldingen

Er kunnen foutmeldingen optreden en die zie je bovenin je scherm.

Als er te weinig woorden zijn bij de gekozen instellingen. Dit kan verholpen worden door een de moeilijkheid wat eenvoudiger in te stellen.

Dubbele woorden in de taken. Ook dan zijn er te weinig woorden bij de gekozen instellingen. Dit kan verholpen worden door een de moeilijkheid wat eenvoudiger in te stellen.

Niet logische synoniemen. Synoniemen worden automatisch gegenereerd uit de database op basis van 'woord afstand'. Het kan gebeuren dat deze automatische synoniemen ogenschijnlijk niet kloppen. In de loop van de tijd worden deze niet logische synoniemen uitgefilterd. Niet logische synoniemen kunnen verholpen worden door de taken opnieuw te genereren.

4. Verzend naar de cliënt

Als je op 'Afronding oefening' geklikt hebt dan kan je de laatste details invoeren voor je cliënt.

Titel voor de cliënt: kies hier een naam voor de oefening zoals je cliënt die ziet. Dit is een verplicht veld.

Persoonlijke boodschap voor de cliënt: hier kan je een persoonlijke boodschap invullen ter motivatie die de cliënt te zien krijgt op de tablet. Dit is een optioneel veld.

Beschikbaar vanaf: kies hier de datum waarop de cliënt de oefening mag maken. Je kan hier oefeningen aanmaken voor een aantal dagen vooruit of te voorkomen dat alle oefeningen in een keer gemaakt worden.

Als je klikt op 'Verstuur aan cliënt' ontvangt de cliënt deze oefening(en) op zijn tablet.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://logopedist.afasietherapie.nl/clients/16/nieuw/complete/422>. The page has a dark blue sidebar on the left with the following menu items: 'Afasietherapie', 'Maak nieuwe oefeningen', 'Beheer cliënten', 'Over Afasietherapie van Logodicks', and 'Jan Pons Logopedist Lillooer'. The main content area has a red progress bar at the top with four steps: '1. Nieuw oefening', '2. Meestijdigheid en tuss', '3. Controle oefeningen', and '4. Verzend naar cliënt'. Below the progress bar, the title of the exercise is 'Schriftelijke taalproductie - Semantiek - Schrijven op dictaat - Voorstelbaarheid.' and the category is 'Afronding'. There are three input fields: 'Titel voor de cliënt' with the value 'Schriftoefening', 'Persoonlijke boodschap voor de cliënt' with the value 'Veel succes', and 'Beschikbaar vanaf' with a calendar widget. The calendar shows April 2019 with the 17th selected. A 'Verstuur aan cliënt' button is located at the bottom right of the form.

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

5. Bekijk de resultaten

Als de cliënt de oefening gemaakt heeft dan komen de resultaten te staan bij 'Oefeningen van de cliënt'.

Achter de afgeronde oefening staat een roze pijltje en als je daarop klikt verschijnt de pagina met de resultaten.

Bovenaan staat de samenvatting en daaronder de resultaten per taak.

Overzicht cliënt gegevens.
de heer Jan Client (273641)

Gebruikersnaam cliënt: JanClient
E-mail: janpons@me.com
Logopedisten: Jan Pons

Oefeningen van de cliënt Maak nieuwe oefening

Alle Afgeronde oefeningen Beschikbare oefeningen

Titel voor de cliënt	Oefening	Status oefening
7. Schriftelijk taalbegrip - Orthografisch - Letteridentificatie.	Schriftelijk taalbegrip - Orthografisch - Letteridentificatie.	Afgerond (door cliënt)
woensdag	Mondeling taalbegrip - Semantiek - Match gesproken woord.	Klaargezet (voor cliënt)
32. Schriftelijke taalproductie - Orthografisch grafemisch - Kopieer letter - Schrijven.	Schriftelijke taalproductie - Orthografisch grafemisch - Kopieer letter - Schrijven.	Klaargezet (voor cliënt)
30. Schriftelijke taalproductie - Orthografisch grafemisch - Kopieer letter - Typen.	Schriftelijke taalproductie - Orthografisch grafemisch - Kopieer letter - Typen.	Klaargezet (voor cliënt)
28. Schriftelijke taalproductie - Grafemisch - Schrijven op dictaat - Frequentie	Schriftelijke taalproductie - Grafemisch - Schrijven op dictaat - Frequentie	Klaargezet (voor cliënt)
24. Schriftelijke taalproductie - Orthografisch - Typen op dictaat - Frequentie	Schriftelijke taalproductie - Orthografisch - Typen op dictaat - Frequentie	Klaargezet (voor cliënt)
22. Schriftelijke taalproductie - Orthografisch - Schrijven op dictaat - Frequentie	Schriftelijke taalproductie - Orthografisch - Schrijven op dictaat - Frequentie	Klaargezet (voor cliënt)
21. Schriftelijke taalproductie - Semantiek - Schrijven op dictaat - Voorstelbaarheid.	Schriftelijke taalproductie - Semantiek - Schrijven op dictaat - Voorstelbaarheid.	Klaargezet (voor cliënt)

20. Schriftelijke taalproductie - Semantiek - Benoemen van afbeelding - Typen.
Schriftelijke taalproductie - Semantiek - Benoemen van afbeelding - Typen.

Aantal items: 10
Moelijkheid: 5

Antwoorden in 1x goed: 5
Antwoorden met cues: 0
Antwoorden fout: 4
Overgeslagen: 1

Beschikbare cues: Geen cues

Opdracht	Antwoord in 1x goed	Aantal cues gebruikt	Aantal keer fout	Overgeslagen
in	✓			
poppenkast	✓			
garnaal	✓			
krumels	✓			
amandel		•	x	
vijen		•		="
frikade		•	x	
bunker	✓			
bananenschi		•	x x	
sandwich		•	x	
Opdracht	Antwoord in 1x goed	Aantal cues gebruikt	Aantal keer fout	Overgeslagen

Dit is wat Afasietherapie van Logoclicks nu kan.

Heb je feedback, opmerkingen of suggesties? Mail ons op service@afasietherapie.nl